







検査項目と検体採取方法の違い

検体共用可能の項目・検体種

製品名 検体採取方法	SARS-Cov-2	SARS-Cov-2 +インフル	インフル	アデノ	hMPV	インフル+RSV	RSV
判定時間	~15分 ^{※1}			3~5分			
	SARS-CoV-2, I-SARS-CoV-2/Flu・Flu 鼻咽頭ぬぐい液			アデノ・hMPV・RSV・Meq・Flu/RSV 鼻腔ぬぐい液			
	鼻腔ぬぐい液			以前からある試薬は、現在の鼻咽頭ぬぐい液を 鼻腔ぬぐい液と表示している			
				鼻腔吸引液			
				咽頭ぬぐい液			
	鼻汁鼻かみ液						
				角結膜ぬぐい液			

^{※1}15分以内でも検査の工程及び採り方の異なる検査キットがある場合は別冊冊子をご覧ください。

検体採取液の共有使用については、各製品添付の文章（添付書）での使用方法をご覧ください。

鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液を用いた相関性試験成績 (抗原定性検査とPCR法の比較)

鼻咽頭ぬぐい液

		RT-PCR法		
		陽性	陰性	合計
本品	陽性	105	1	106
	陰性	15	102	117
	合計	120	103	223

n=223

陽性一致率：87.5%

陰性一致率：99.0%

全体一致率：92.8%

鼻腔ぬぐい液

		RT-PCR法		
		陽性	陰性	合計
本品	陽性	79	2	81
	陰性	37	120	157
	合計	116	122	238

n=238

陽性一致率：68.1%

陰性一致率：98.4%

全体一致率：83.6%